

## FRESH MIKROHULLÁMÚ STERILIZÁLÓ MODELL: FRISS SZÁM: LS-B701



Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

**FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TARTSA MEG!**

**EZT A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT, A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT, ÉS A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ TARTALMAZZA.**

**A STERILIZÁLÓ HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A ÚTMUTATÓT.**

**ŐRIZZE MEG KÖNNYEN ELÉRHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS HELYEN KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!**

**A TERMÉKEKRE ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT, IRÁNYMUTATÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZ.**

Ez a készülék segít a palackok és kis tartozékok gyors és egyidejű sterilizálásában. A gőz intenzív melegének köszönhetően a káros baktériumok elpusztulnak, és ez hozzájárul a cumisüvegek és élelmiszer-kiegészítők gyors és biztonságos sterilizálásához. A palackfogót és a mérőpoharat a készlet tartalmazza.

**AJÁNLÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ**

**MEGJEGYZÉS:** A kézikönyv be nem tartása visszafordíthatatlan károsodásokhoz vezethet! **FIGYELEM!** Minden héten tisztítsa meg a sterilizálót, hogy csökkentse a vízkölerakódás kockázatát.

1. A sterilizátort nem gyermekek általi használatra tervezték. Tartsa távol kisgyermekektől és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyektől.
2. A terméket cumisüvegek/poharak és etetőtartozékok sterilizálására tervezték, amelyek gőzzel sterilizálhatók.
3. **FIGYELEM!** A mikrohullámú sütő károsodásának veszélye. Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a termékbe.
4. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
5. Figyelem! Ez a készülék háztartási használatra készült.
6. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.
7. Ez a termék felelős személyek általi használatra készült!
8. Ha a terméket nem használja, tartsa száraz és hűvös helyen, gyermekektől elzárva.
9. A sérülésveszély elkerülése érdekében. Csak rendeltetés szerűen és a kézikönyvben leírtak szerint használja.
10. A sterilizálás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a sterilizátor alja fel van töltve vízzel.
11. Soha ne használja a sterilizátort víz nélkül.
12. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá. Ne végezzen semmilyen fejlesztést vagy változtatást a terméken, mert ez a termék meghibásodásához vagy károsodásához vezethet.
13. Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a terméket.
14. Ne töltsen túl vízzel a sterilizáló alját.
15. Csak tiszta, adalékanyagok nélküli vizet használjon. Javasoljuk, hogy forralt vizet használjon.
16. Ne tegyen fehérítőt vagy más vegyszert a sterilizálóba.
17. Ne töltsen túl a sterilizátort, különben a sterilizációs folyamat nem lesz hatékony.
18. Ne nyissa fel a fedelet közvetlenül a sterilizálás után. A kilépő gőz nagyon forró. Hagyja lehűlni a sterilizátort, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
19. Minden használat után öntse ki a maradék vizet a sterilizátorból, miután az lehült.
20. Tárolás előtt hagyja kihűlni a sterilizátort.
21. Azután mozgassa vagy tisztítsa meg a sterilizátort, miután teljesen lehült.
22. Sterilizálás után ne érje el, és ne próbálja meg eltávolítani a forró tárgyakat a sterilizátorból.
23. Mindig mosson kezet, mielőtt hozzáér a sterilizált tárgyakhoz.
24. Ne tegye ki a sterilizátort magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek vagy közvetlen hallóforrásnak – nyílt tűznek vagy fűtőtestnek.
25. Ne helyezze a sterilizálót forró felületre.
27. Rendszeresen ellenőrizze a terméket sérülések szempontjából. Azonnal hagyja abba a használatát, ha ilyet talál.
26. Ne használja a mikrohullámú sütő grill funkcióját. Ha használta a grill funkciót, a sterilizálás megkezdése előtt várja meg, amíg a mikrohullámú sütő kihűl, mielőtt behelyezné a sterilizálót.
28. Ne próbálja meg saját maga módosítani vagy megjavítani a terméket, ha sérült. Tanácsért forduljon egy hivatalos szervizközpontozóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a sterilizátort vásárolta.
29. Ha a terméket nem használja, száraz és hűvös helyen tárolja, közvetlen hőforrástól, víztől vagy gyermekektől távol.
30. A sterilizátor a REACH szerint a 1907/2006 sz. EK rendeletnek megfelelően tesztelt és megfelel.

### JELLEMLÉZŐK

1. Cumisüvegek/cumisüvegek, cumisüveg szilikon, cumisüveggyűrűk, cumik stb. sterilizálására szolgál.
2. Legfeljebb 5 palack egyidejű sterilizálása.
3. Minden 750 W-os és nagyobb névleges teljesítményű mikrohullámú sütő modellhez alkalmazható.
4. Palack sterilizálása legfeljebb 8 percre.
5. Könnyű és könnyen használható – ideális utazáshoz
6. 15,5 cm-es palackokhoz illeszkedik
7. Mosogatógépben mosható – felső állvány.
8. Méret: Átmérő – kb. 28 cm; Magasság: körülbelül 18 cm;

### ALKATRÉSZEK – LÁSD A PD ÁBRÁ

1. Fedő
2. Kosár palackokhoz és egyéb sterilizáláshoz szükséges tárgyakhoz
3. A sterilizáló teste/alapja
4. Mérőpohár
5. Palackfogó
6. Fedőkapcsok

### A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KEZDÉSE ELŐTT

A termék első használata előtt alaposan tisztítsa meg a sterilizálót az alábbiak szerint: 1. Vegye ki a kosarat az alapról.

2. Töltsön meg egy cumisüveget vagy mérjen ki pontosan 200 ml csapvizet, és öntse a sterilizáló aljába. A víz mennyiségének pontosan 200 ml-nek kell lennie, ha több, a tárgyak nem sterilizálódnak. És ha a víz nem elég, a sterilizátor vagy a mikrohullámú sütő megsérül.
3. Helyezze a kosarat az alapba.
4. Helyezze fel a sterilizáló fedelét, és nyomja le a kapcsokat, hogy teljesen rögzítse.
5. Helyezze be a sterilizátort a mikrohullámú sütőbe.
6. A sterilizálás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a mikrohullámú sütő tiszta és száraz, válassza ki a megfelelő teljesítményt és a sterilizálási időt, majd kapcsolja be.
7. A mikrohullámú sütő befejezése után nyissa ki, és hagyja kihűlni a sterilizátort, mielőtt kivesszi.
8. Nyissa ki a kapcsokat, és vegye le a fedelet.
9. Öntse ki a maradék vizet, és alaposan öblítse le az alapot és a kosarat.

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Ez a mikrohullámú sterilizátor legfeljebb 5 palack és tartozékai sterilizálására alkalmas. Más műanyag etetőtartozékok, mint például kanál, mellszívó stb. is sterilizálhatók, ha 100°C-ig megfelelőek, és nincs bennük más fém alkatrész.
2. Nyissa fel a fedelet mindkét kapocs elengedésével, és távolítsa el.
3. Vegye ki a kosarat az alapról.
4. A mérőpohár segítségével adjon hozzá körülbelül 200 ml vizet a sterilizáló aljához. Javasoljuk, hogy forralt vagy szűrt vizet használjon, hogy csökkentse a vízkölerakódás kockázatát.
5. **SOHA HASZNÁLJA A STERILIZÁLÓT VÍZ NÉLKÜL!**
6. Helyezze a kosarat az alapba
7. Mielőtt a sterilizáló tárgyakat a kosárba helyezi, alaposan mossa le forró vízzel és egy kevés tisztítószerezrel. Távolítsa el az összes tejmaradványt.
8. Helyezze a palackokat és egyéb tartozékokat a kosárba. A palackokat/poharakat fejjel lefelé kell helyezni a nekik szánt bordákra. Helyezze a mellbimbókat és az egyéb tartozékokat a fennmaradó szabad helyre.
9. Győződjön meg arról, hogy minden tárgyat, amelyet sterilizálni kell, teljesen szétszerelt a teljes sterilizálás érdekében.
10. **Megjegyzés:** Ne tegye túl közel egymáshoz a tárgyakat. A gőznek keringenie kell körülöttük a hatékony sterilizálás érdekében.
11. Ne sterilizálja hűtőfolyadékkal a palackfejt vagy más folyadékkal megtöltött tárgyat pl: hűtőfolyadékos rágóka

12. Helyezze a fedelet a sterilizátorra, és nyomja le a kapcsokat, hogy jól rögzítse.

13. Helyezze a sterilizátort a mikrohullámú sütő közepére, és állítsa be a sütő teljesítményét és a sterilizálás idejét az alábbiak szerint:

-500 - 800 W: 6 perc;      -850 - 1000W: 4 perc;      -1100 - 1800W: 2 perc

14. SOHA NE HASZNÁLJA A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ GRILL FUNKCIÓJÁT STERILIZÁLÁSRA

15. A sterilizálás végén nyissa ki a mikrohullámú sütőt. VIGYÁZAT – forró gőz távozhat a mikrohullámú sütőből. Hagyja kihűlni a sterilizátort, mielőtt kiveszi.

16. Vegye ki a sterilizálót. Tartsa vízszintes helyzetben, hogy elkerülje a forró víz szivárgását vagy kifolyását.

17. Távolítsa el a fedelet. Legyen óvatos, mert forró gőz maradhat a sterilizátorban. Vegye ki az üvegeket és a többi tárgyat a mellékelt fogóval.

Megjegyzés: Ne felejtse el alaposan kezét mosni, mielőtt kiveszi a sterilizált tárgyakat.

18. Figyelem: Normális, hogy a sterilizálás után némi víz maradt. Öntse ki a maradék vizet, öblítse le jól az alapot és a kosarat, és szárítsa meg jól az összes részt.

ÚTMUTATÓ A STERILIZÁLÓ KARBANTARTÁSÁHOZ ÉS TISZTÍTÁSÁHOZ

1. Megjegyzés: Ne használjon súroló felületű szivacsot a készülék tisztításához vagy agresszív tisztítószereket – fehérítő, alkohol alapú (nedves törölőkendő) vagy súroló hatású részecskéket.

2. Minden használat után tisztítsa meg a fedelet, a kosarat és az alapot, hogy elkerülje a vízkő lerakódását vagy a szennyezett foltokat.

3. A sterilizálót mosogatógépben és csak a felső kosárban tisztíthatja.

4. A termék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen kihűlt és nem forró.

1. Megjegyzés: Ne használjon súroló felületű szivacsot a készülék tisztításához vagy agresszív tisztítószereket – fehérítő, alkohol alapú (nedves törölőkendő) vagy súroló hatású részecskéket.

2. Minden használat után tisztítsa meg a fedelet, a kosarat és az alapot, hogy elkerülje a vízkő lerakódását vagy a szennyezett foltokat.

3. A sterilizálót mosogatógépben és csak a felső kosárban tisztíthatja.

4. A termék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen kihűlt és nem forró.

5. A vízkő eltávolítása ecettel: A. Tisztítás előtt a terméket teljesen le kell hűteni.

B. Keverjen el 100 ml forró vizet 50 ml ecettel, és öntse a sterilizált aljába. C. Hagyja állni 30 percig, hogy az oldat hatni kezdjen. Ezután öntse ki az oldatot. D. Öblítse le a lerakódást, majd törölje szárazra.

E. Ilyen oldattal és nedves ruhával letörölheti a kosarat és a fedelet. Ezután alaposan öblítse le és törölje szárazra.

6. Rendszeresen ellenőrizze a terméket sérülések, repedések, hiányzó vagy törött alkatrészek szempontjából. Ha ilyen

talál, hagyja abba a használatát, amíg el nem távolítja a sérülést. Ebből a célból kapcsolatba kell lépnie azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. Ne próbálja egyedül megjavítani a terméket.

7. Megjegyzés: Tisztítás után a terméket tiszta, száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolja.

